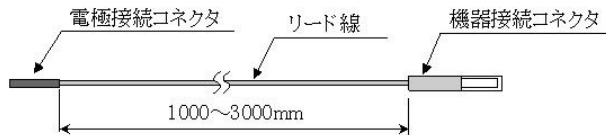


機械器具 (21) 内臓機能検査用器具
 一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010
ビットケーブル

【禁忌・禁止】**併用医療機器**

磁気共鳴画像診断装置を併用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】**形状****作動・動作原理**

本品は、電極接続コネクタに接続した電極から導出された生体電気信号を筋電計、誘発反応測定装置等に伝達します。

【使用目的又は効果】**使用目的**

本品に電極を接続して、被検者の生体電気信号を筋電計、誘発反応測定装置等に伝達する為の中継ケーブルです。

【使用方法等】**使用方法**

1. 本品の電極接続コネクタを使用する電極の接続端子に、機器接続コネクタを筋電計、誘発反応測定装置等の入力部に接続します。
2. 使用する電極や機器の「使用方法」に従い、測定を開始します。
3. 使用後、電極や機器との接続を外し、清潔にして保管して下さい。

再使用のために必要な処置

使用後はエタノールを含ませた柔らかい布等で拭いて下さい。

【使用上の注意】

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

| 医療機器の名称等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|-------------------|-----------|-------------------------------|
| 磁気共鳴画像診断装置（MRI装置） | 使用禁止 | 磁気による吸引力又は、誘導起電力が発生することがあります。 |

その他の注意

- ・本品は未滅菌製品です。
- ・本品を滅菌する場合は、EOG 滅菌を使用し、オートクレーブ滅菌や乾熱滅菌で滅菌しないで下さい。
- ・使用後、接続を取り外す際はリードを持って引き抜くなど無理な力を掛けないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】**保管方法**

本品は、以下の条件を満たす場所に保管して下さい。

- ・高温多湿、水濡れを避け、ほこり、塩分、イオウを含む環境での保管を避けて下さい。
- ・化学薬品の保管場所を避け、ガスの発生しない場所。

有効期間

5年間（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ユニークメディカル
 電話：03-3480-7259