

長時間用脳波血電極

【禁忌・禁止】

併用医療機器

MRIを併用しないこと。[相互作用の項参照]

使用方法

- ・オートクレーブ滅菌はしないで下さい。
- ・クレゾール、グルタルアルデヒドを用いた薬液消毒はしないで下さい。


【形状・構造及び原理等】

組成

*血電極：銀

形状

*

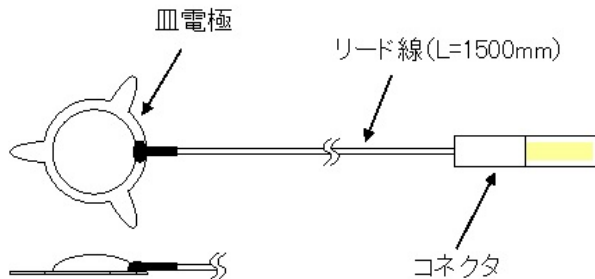

【使用目的又は効果】

性能

抵抗：2Ω以下（電極 - 接続端子間）

使用目的

頭皮において脳の様々な領域の電位変化を記録する導体です。

【使用方法等】

使用方法

- (1) 装着部位を決定します。
- (2) 電極のペースト貯めに脳波ペーストを充填します。
- (3) 脳波ペースト側を装着部位に接触するように電極を装着します。
- (4) 装着した電極の周囲の頭皮に 5%コロジオン駅を塗布し、ドライヤーで乾かします。
- (5) 医用電子機器に本品の接続端子を接続します。

使用方法に関連する使用上の注意

- ・本品は、未滅菌製品です。滅菌する場合は、必ず EOG 滅菌で行って下さい。
- ・本品はペースト用いて測定しますが、ペーストは時間が経つと固まり、電極性能が劣化しますので、使用後は速やかに電極面に付着したペーストを取り除き、エタノールを含ませた柔らかい布等で清掃して下さい。
- ・傷及び炎症等のある部位には装着しないで下さい。
- ・刺激用には使用しないで下さい。

【使用上の注意】

相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	*臨床症状・措置方法	*機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MRI)	*使用禁止	*磁気による吸引力又は誘導起電力が発生することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- *本品は、以下の条件を満たす場所に保管して下さい。
- *・高温、多湿を避け、ほこり、塩分、イオウを含む空気にならされない場所。
- *・化学薬品の保管場所を避け、ガスの発生しない場所。

有効期間

本品は消耗品です。開封時に傷、破損、素材の変質等がみられた場合のみ、無償交換いたします。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ユニークメディカル
電 話：03-3480-7259