

中継リードB

【禁忌・禁止】

**併用医療機器

電気手術器(電気メス)、磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)を併用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

*形状



**機能

導体抵抗: 25Ω以下(コネクタピンと接続端子間)

*作動・動作原理

生体の生体信号を医用電子機器に導く導体です。接続する一般的な装置は脳波計、誘発電位検査用装置です。

【使用目的又は効果】

*使用目的

脳波、誘発電位の生体信号を検知する導体からの電位を脳波計、誘発電位検査用装置に導く中継リードです。

【使用方法等】

**使用方法

1. 「頭蓋内電極(承認番号: 21000BZZ00119000)」を本品のコネクタ側に差し込みます。
2. 本品の接続端子を医用電子機器に接続します。
3. 医用電子機器を必要な感度に設定し、測定を開始します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品は未滅菌製品です。使用前、後に必ず清掃、EOG滅菌を施して下さい。
- **・本品の使用後、医用電子機器より取り外すときは、必ず接続端子を持って引き抜いて下さい。[リード線を持って引き抜くと断線する場合があります。]

相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)	使用禁止	*磁気による吸引力又は、誘導起電力が発生することがあります。
電気手術器(電気メス)	使用禁止	*電気手術器の電流により、発熱が生じることがあります。

【保管方法及び有効期間等】

*保管方法

本品は、以下の条件を満たす場所に保管して下さい。

- ・高温、多湿を避け、ほこり、塩分、イオウを含む空気にさらされない場所。
- ・化学薬品の保管場所を避け、ガスの発生しない場所。

耐用期間

**5年間[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社ユニークメディカル
電話番号: 03-3480-7259