

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
 一般医療機器 頭皮脳波用電極 (11440001)

脳波皿電極

【禁忌・禁止】

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置) を併用しないこと。
 [相互作用の項参照]


【形状・構造及び原理等】

原材料


種類	電極の原材料
頭皮脳波用	銀塩化銀
長時間用	銀

形状

種類：頭皮脳波用

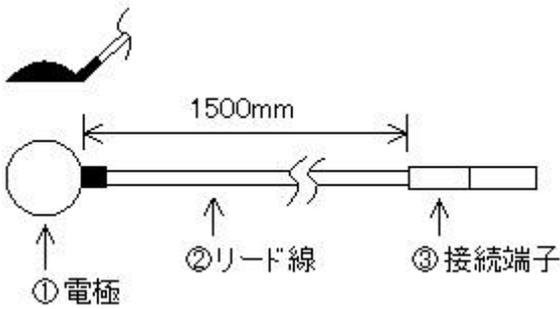

種類：長時間用

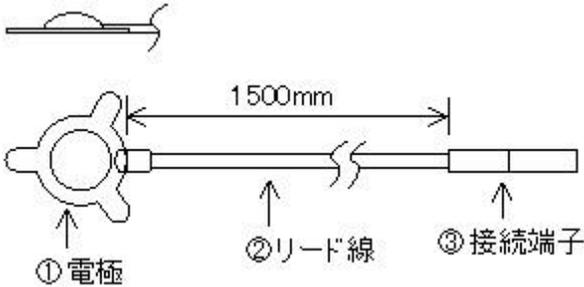

作動・動作原理

電極から導出された生体電気信号を脳波計に伝達します。

【使用目的又は効果】

使用目的

頭皮に装着し、脳波測定または脳波検査に使用する信号導出用の電極です。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 装着部位を決定します。
- 2) インピーダンスを下げる為、装着部位の頭皮を酒精綿等でよくこすります。
- 3) 電極にペーストを厚さ 1mm 盛り上がる程度にのせ、装着します。
- 4) 脱脂綿等の小片で軽く電極を覆って押さえ、サージカルテープ等で電極を固定します。
- 5) 接続端子を医用電子機器に接続します。
- 6) 医用電子機器を使って測定や検査を開始します。

使用方法に関連する使用上の注意

- ・ 傷および炎症のある部位に装着しないでください。

【使用上の注意】

相互作用 (他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

併用禁忌 (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置)	使用禁止	磁気による吸引力又は、誘導起電力が発生することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 以下の条件を満たす場所で保管してください。
- ・ 高温多湿を避け、埃、塩分、イオウ分を含む空気にさらされない場所。
 - ・ 化学薬品の保管場所を避け、ガスの発生しない場所。

耐用限界について

- 以下のいずれかの事象が認められた場合、使用を中止してください。
- ・ 製品の変色や劣化・破損したとき。
 - ・ 製品性能の維持が難しいとき。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄

使用後に洗浄せずに放置するとペーストが固まり、電極性能が劣化しますので、使用後は速やかに洗浄してください。

 - 1) 水又はぬるま湯で電極等に付着したペーストを洗い流します。
 - 2) 水分をよく拭き取り、電極表面や接続端子を酒精綿で清掃した後、乾燥させてください。
2. 注意事項
 - ・ 熱湯や塩素系漂白剤で清掃しないでください。
 - ・ 滅菌は行わないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ユニークメディカル
 T E L : 03-3480-7259