

ビットケーブル


【禁忌・禁止】

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)を併用しないこと。
[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

形状

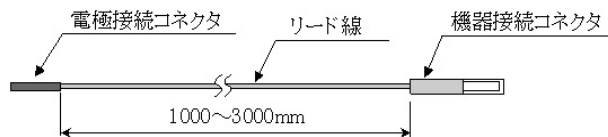

作動・動作原理

本品は、電極接続コネクタに接続した電極から導出された生体電気信号を筋電計、誘発反応測定装置等に伝達します。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品に電極を接続して、被検者の生体電気信号を筋電計、誘発反応測定装置等に伝達する為の中継ケーブルです。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 本品の電極接続コネクタを使用する電極の接続端子に、機器接続コネクタを筋電計、誘発反応測定装置等の入力部に接続します。
- 2) 使用する電極や機器の「使用方法」に従い、測定を開始します。
- 3) 使用后、電極や機器との接続を外し、清潔にして保管して下さい。

【使用上の注意】

相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)	使用禁止	磁気による吸引力又は、誘導起電力が発生することがあります。

その他の注意

- **・オートクレーブ滅菌器や乾熱滅菌器で滅菌しないでください。[本品が破損する可能性があります。]
- ・本品に水が掛からないように注意してください。
- ・本品の使用後、医用電子機器より取り外す際は、必ず接続端子を持って引き抜いてください。[リードを持って引き抜くと断線する場合があります。]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 本品は、以下の条件を満たす場所に保管して下さい。
- ・高温多湿、水濡れを避け、ほこり、塩分、イオウを含む環境での保管を避けて下さい。
 - ・化学薬品の保管場所を避け。ガスの発生しない場所。

*耐用限界について

製品の変色や劣化などが認められた場合には、使用を中止してください。

**【保守・点検に係る事項】

- ・本品は未滅菌製品です。
- ・本品を滅菌する場合、下記の「推奨滅菌」に従って、滅菌してください。
- ・使用後は、エタノールを含ませた布等で拭いてください。

推奨滅菌

- ・EOG滅菌
使用する滅菌装置の添付文書や取扱説明書または施設が定める方法に従い、滅菌してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ユニークメディカル
TEL：03-3480-7259