

ユニーク針ケーブル

【禁忌・禁止】


使用方法

- ・高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)や乾熱滅菌器での滅菌はしないこと。[破損等の原因になるため。]

【形状・構造及び原理等】

*形状

種類:コンビネーションタイプ

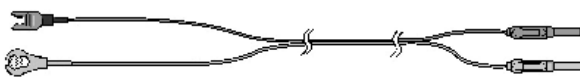

種類:セパレーションタイプ



機能

項目	規格
導通抵抗	6Ω以下
絶縁抵抗	100MΩ以上

作動・動作原理

導線の両側に接続部を有する導電媒体です。本品の基準電極コネクタに接続された体表面電極の電位を基準として、本品のユニーク針接続コネクタに接続された針電極から導出された生体信号を、本品の機器接続コネクタから医用電気機器に導く中継ケーブルです。

【使用目的又は効果】

使用目的

筋電図用針電極に接続して、被検者の筋電図信号を筋電計等に伝達するための装置です。

【使用方法等】

使用方法

1. 機器接続コネクタの識別に合わせて、筋電計等の装置に接続します。
2. ユニーク針コネクタをユニーク針(薬液注入針電極)の基部に接続し、しっかり固定します。
3. 基準電極コネクタを基準電極のスナップに接続します。
4. 接続機器の手順に従って操作を開始します。

使用方法に関連する使用上の注意

- ・本品を接続した装置が動作中は、本品の金属部分に触れないでください。

【使用上の注意】

その他の注意

- ・使用前に接続部の磨耗や樹脂部の裂け目、断線等がないか確認し、欠陥があった場合は使用しないでください。
- ・本品を接続した装置を使用前に、装置と本品の接続が正しく接続されており、本品のコネクタに緩みがないかを確認してください。もしコネクタに緩みがある場合は本品は使用しないでください。
- ・本品が「薬液注入針電極(ユニーク針)」に接続された状態で、シリンジの取り付けや取り替えを行わないでください。
[接続したまま取り付けると、針とシリンジが確実に取り付けられず、液漏れやロック不良を引き起こす原因になります。]
- ・使用后、本品の接続を装置から取り外す際は、コネクタを持って引き抜いてください。[リード線を持って引き抜くと、断線する場合があります。]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 本品は、以下の条件を満たす場所に保管してください。
- ・高温、多湿を避け、ほこり、塩分、イオウを含む空気にはさらされない場所。
- ・化学薬品の保管場所を避け、ガスの発生しない場所。

耐用限界について

製品の変色や劣化などが認められた場合には、使用を中止してください。

**【保守・点検に係る事項】

- ・本品は未滅菌製品です。
- ・本品を滅菌する場合、下記の「推奨滅菌」に従って、滅菌してください。
- ・使用後は、エタノールを含ませた布等で拭いてください。

推奨滅菌

- ・EOG 滅菌
使用する滅菌装置の添付文書や取扱説明書または施設が定める方法に従い、滅菌してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社ユニークメディカル
TEL : 03-3480-7259